







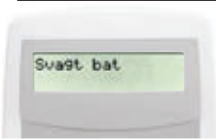

# Larm och åtgärdsförslag

Nedan följer några exempel på de vanligaste pumplarmen. Vid felsökning på pumpen är det viktigt att läsa vad som står i fönstret.

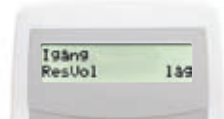**För fullständig information om samtliga larm, se Användarhandledning för CADD-Legacy Duodopa.**

Fönstret	Larm	Orsak	Åtgärd
	Tre tvåtons-signalvar 5:e minut	Batterierna är svaga, men pumpen kan fortfarande köras.	Byt snarast ut batterierna.
	Tvåtonslarm	Pumpen har upptäckt högt tryck, pga flödesstopp i sonden, knickad kassettslang eller sond, en tillsluten slangklämma eller att den röda skyddskorken sitter kvar på kassettslangen.	Avlägsna hindret så att du kan sätta igång pumpen igen. Du kan också trycka på <b>STOP/START</b> eller <b>NÄSTA</b> för att stoppa pumpen och tysta larmet i 2 minuter. Avlägsna sedan hindret och starta pumpen igen. Kontakta behandlande klinik om problemet kvarstår.
	Tvåtonslarm	Du försökte starta pumpen utan att kassetten var korrekt ansluten. En kassett måste vara ansluten för att pumpen ska kunna köras.	Tryck på <b>STOP/START</b> eller <b>NÄSTA</b> för att tysta larmet. Sätt fast kassetten ordentligt.
	Tre enstaka pip	Reservoarvolymen är låg.	Byt snarast ut kassetten och återställ reservoarvolymen.

fortsättning nästa sida >

Fönstret	Larm	Orsak	Åtgärd
	Tvåtonslarm	Reservoarvolymen har nått 0,0 ml.	Tryck på <b>STOP/START</b> eller <b>NÄSTA</b> för att tysta larmet. Anslut en ny kassett och återställ reservoarvolymen.
	Inget larm	Ett värde sparades inte då tryckning på <b>ENTER/RADERA</b> ej utfördes.	Tryck på <b>NÄSTA</b> för att återuppta programmeringen. Bekräfta alla programmeringar innan du går vidare till nästa fönster eller startar pumpen.
	Inget larm	LEC-Last Event Code dvs senaste larmet och en siffra som upplyser om vilken typ av larm.	Om detta syns vid uppstart av pumpen, ska Duodopa Support kontaktas.
	Tvåtonslarm	Pumpen var igång när batterierna togs ut. Pumpen har nu stoppats och får ingen ström. Eller så togs batterierna ut inom ca 15 sekunder efter att pumpen stoppats.	Sätt tillbaka batterierna så tystnar larmet.

- Vid rengöring av pump använd tvållösning och en väl urvriden trasa med ljummet vatten.
- Sänk aldrig ner pumpen i rengöringsvätska och låt aldrig någon vätska tränga in i pumpen, knappsatsen eller i batterifacket.
- Använd inte aceton, andra plastlösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Lufttorka innan pump används.
- Pumpen är inte vattentät och måste kopplas bort.
- Använd inte pumpen vid temperaturer under +2° C eller över +40° C. Förvara inte pumpen vid temperaturer under -20° C eller över +60° C.
- Om du upplever biverkningar eller får problem med pump och/eller magsond kontakta din läkare eller sjuksköterska.

**Duodopa Support: 020-50 60 50, [info@duodopa.se](mailto:info@duodopa.se)**





# Batteribyte

Använd bara vanliga AA-batterier (ej uppladdningsbara). Då kommer pumpen att tala om för dig (larma) när det är dags att byta batterier.

1. Tryck på **STOP/START** i 3 sek. **STOPPAD** visas i fönstret.
2. Tryck ner och håll pilknappen på batteriluckan (A) nedtryckt medan du för luckan åt sidan (B).
3. Ta ut de begagnade batterierna. Det är lättare att ta ut batterierna om man drar i batteriremmen.
4. Sätt i de nya batterierna ovanpå batteriremmen. Passa ihop plus och minus markeringar med motsvarande markering inuti batterifacket. När batterierna är riktigt isatta piper pumpen och slås automatiskt på. Tryck på **STOP/START** för att starta infusionen av läkemedel.
5. Sätt tillbaka batteriluckan genom att hålla pilknappen nedtryckt (glider lättare på plats då).

**OBS!** Ta ur batterierna om pumpen inte ska användas under flera dagar.

Om du upplever biverkningar eller får problem med pump och/eller magsond kontakta din läkare eller sjuksköterska.

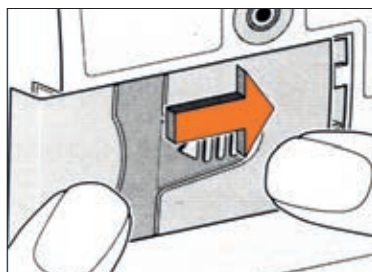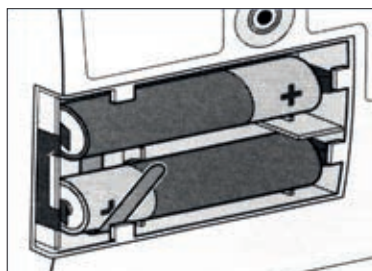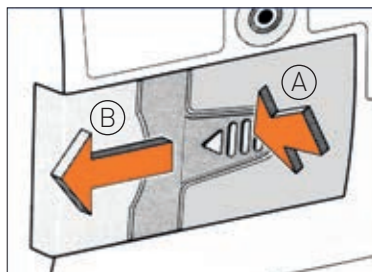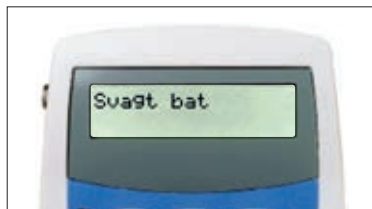

**Duodopa Support: 020-50 60 50, [info@duodopa.se](mailto:info@duodopa.se)**