
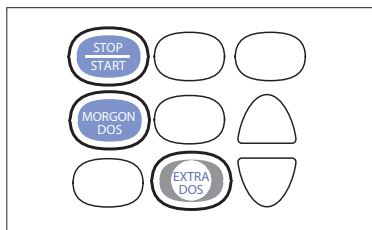
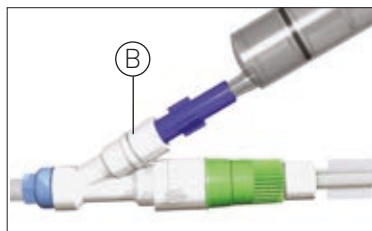


# Duodopa-användning i mer än 16 timmar

Om du har fått Duodopa förskrivet för användning dygnet runt (över natt), kan du behöva byta kassett mer än en gång per dygn, beroende på din dygnsdos. Oberoende av när du byter kassett ska du alltid spola systemet på morgonen och därefter ta en morgondos. Du kan även vara ordinerad en annan kontinuerlig dos under natten. Följ instruktionerna nedan:

**Morgonrutin:** På morgonen skall sonden spolas och eventuell morgondos tas. Eventuellt ska du även ändra den kontinuerliga dosen och byta kassett (se längre ned för dessa instruktioner).


1. Tryck på knappen **STOP/START** i 3 sek.  
**STOPPAD** visas i fönstret.
2. Skruva av kassettslangen från intestinalporten.
3. Enligt förskrivning: Spola med minst 20 ml rumstempererat dricksvatten på morgonen i både intestinalporten (A) och i Y-kopplingens sidoport (B). Använd en w/w adapter.
4. Återanslut kassettslangen till intestinalporten på sonden. Vrid inte på PEG eller innersond.
5. Tryck på knappen **STOP/START** i 3 sek.  
**IGÅNG** visas i fönstret efter ca 15 sek.
6. Tryck på knappen **MORGONDOS**.  
Den inställda morgondosen visas.
7. Tryck på knappen **MORGONDOS** igen.  
Pumpen ger den inställda morgondosen och därefter automatiskt den kontinuerliga infusionen.
8. Under dagen kan extradoser tas vid behov enligt läkares ordination.

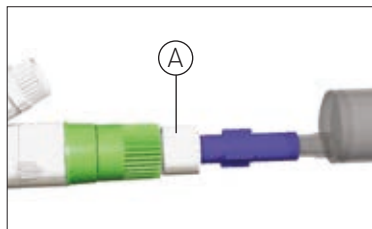

## Ändring av kontinuerlig dos


Du kan ha blivit instruerad av din läkare att använda olika doser under dag- respektive nattetid. Om det är så, följ nedanstående instruktioner morgon och kväll:

1. Tryck på knappen **STOP/START** i 3 sek.  
**STOPPAD** visas i fönstret.
2. Tryck på **NÄSTA** tills **KONT.**  
**INFUSION ML/TIM** visas i fönstret.
3. Tryck på pilknapparna tills önskad dos visas i fönstret.
4. Tryck på **ENTER/RADERA** för att bekräfta dosändringen.
5. Tryck på **STOP/START** i 3 sek.  
**IGÅNG** visas i fönstret efter ca 15 sek.

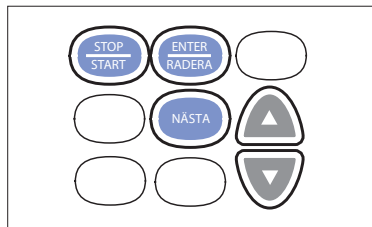

**Kassettbodye:** Du behöver byta kassett minst en gång per dygn, beroende på vilken dos du är ordinerad. En kassett får användas i högst 24 timmar efter öppnandet.

1. Tryck på knappen **STOP/START** i 3 sekunder. **STOPPAD** visas i fönstret.
2. Tryck på **PÅ/AV** i 3 sek. Pumpen slås av.
3. Skruva av kassettslangen från intestinalporten.

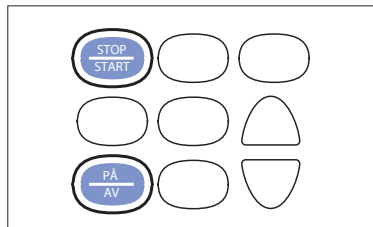

4. Byt till en ny kassett.
5. Återanslut kassettslangen till intestinalporten på sonden.  
Vrid inte på PEG eller innersond.
6. Tryck på **PÅ/AV** i 3 sek. Pumpen går igenom de inställda värdena, ca 30 sek. **STOPPAD** visas i fönstret.
7. Tryck på **STOP/START** i 3 sek. **IGÅNG** visas i fönstret efter ca 15 sek.
8. Använda kassetter ska lämnas till apoteket för destruktion.

**Kvällsrutin:** Beroende på hur du har förskrivits Duodopa varierar kvällsrutinen. Du kanske inte behöver göra någonting till kvällen, eller så ska du enligt ordination ändra kontinuerliga dosen och/eller byta kassett. Se ovan för instruktioner för detta.

Om du upplever biverkningar eller får problem med pump och/eller magsond kontakta din läkare eller sjuksköterska.