
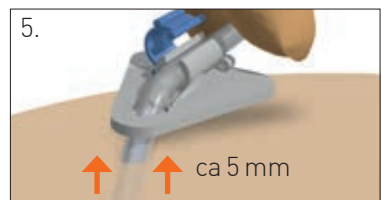
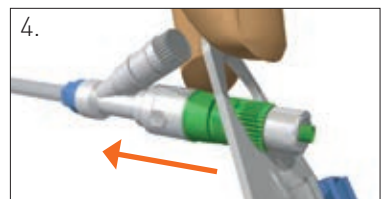


Byte av yttre fixeringsplatta

1. Tryck på **STOP/START** i 3 sek.
STOPPAD visas i fönstret.
2. Skruva av kassetterns slang från intestinalporten.
3. Öppna klämman på fixeringsplattan och lösgör sonden. Klipp av fixeringsplattan och kassera den.
4. Ta en ny fixeringsplatta och trä den över kopplingen, en port i taget. Fixeringsplattan är väldigt töjbar.
5. För fixeringsplattan mot magen så det blir en lätt dragspänning och avståndet mellan huden och den yttre fixeringsplattan är ca 5 mm.
6. Fixera sonden på fixeringsplattan och stäng klämman.

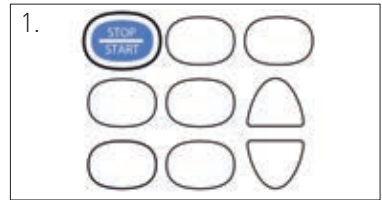

Duodopa Support:
020-50 60 50
info@duodopa.se