




Batteribyte

Använd bara vanliga AA-batterier (ej uppladdningsbara). Då kommer pumpen att tala om för dig (larma) när det är dags att byta batterier.

1. Tryck på **STOP/START** i 3 sek. **STOPPAD** visas i fönstret.
2. Tryck ner och håll pilknappen på batteriluckan (A) nedtryckt medan du för luckan åt sidan (B).
3. Ta ut de begagnade batterierna. Det är lättare att ta ut batterierna om man drar i batteriremmen.
4. Sätt i de nya batterierna ovanpå batteriremmen. Passa ihop plus och minus markeringar med motsvarande markering inuti batterifacket. När batterierna är riktigt isatta piper pumpen och slås automatiskt på. Tryck på **STOP/START** för att starta infusionen av läkemedel.
5. Sätt tillbaka batteriluckan genom att hålla pilknappen nedtryckt (glider lättare på plats då).

OBS! Ta ur batterierna om pumpen inte ska användas under flera dagar.

Om du upplever biverkningar eller får problem med pump och/eller magsond kontakta din läkare eller sjuksköterska.

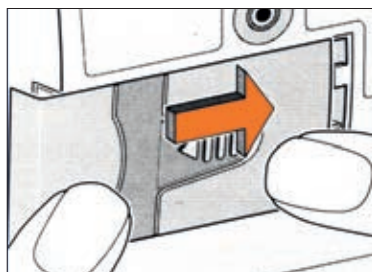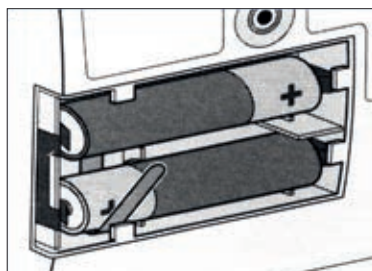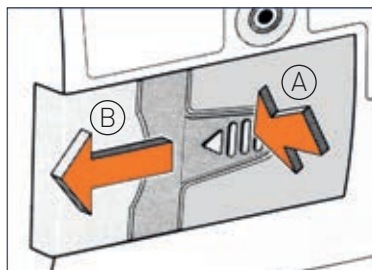

Duodopa Support: 020-50 60 50, info@duodopa.se